

オプティ・フリー®

OPTI-FREE®

デイリークリーナー

洗浄液

全ソフト、O₂ハードコンタクトレンズ用

本剤は、グループ I ～グループ IV のすべてのソフトコンタクトレンズに使用できます。

- ・ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。
- ・この説明書に記載された使用方法及び使用上の注意は必ずお守りください。
- ・ソフト、O₂ハードコンタクトレンズをご使用になる前に、その取扱説明書もあわせてよく読みください。

オプティ・フリー® デイリークリーナーは、ソフト、O₂ハードコンタクトレンズの洗浄に優れた効果をもたらす、新しいタイプの洗浄液です。本品は、レンズ表面のタンパク、ムチン、脂肪などの付着した汚れを効果的に洗浄します。

〈主成分〉

微粒子高分子ポリマー 非イオン系界面活性剤 塩化ポリドロニウム

〈使用方法〉

ソフトコンタクトレンズの場合

洗浄

- ・オプティ・フリー® デイリークリーナーをよく振ります。
- ・片方のレンズをはずし、手のひらにのせます。
- ・レンズの片面にオプティ・フリー デイリークリーナーを1～2滴ずつつけます。
- ・手のひらにのせたレンズをもう一方の手の人差指で（あるいは親指と人差指でレンズをはずして）、20秒ほどこすります。

すすぎ

- ・レンズの両面にオプティ・フリー® マルチパーパスソリューション（以下、MPS）を数滴たらし、1～2秒こすります。
- ・オプティ・フリー（MPS）を注ぎながらレンズを静かにこすり、両面を十分に洗い流します。

消毒

- ・洗浄後必ず、眼科医の指示する方法で消毒してください。オプティ・フリー®（MPS）をご使用の際は、その取り扱い説明書の消毒方法に従って消毒してください。

O₂ハードコンタクトレンズの場合

洗浄

- ・ソフトコンタクトレンズと同様に行ってください。

すすぎ

- ・眼科医の指示する方法ですすぎ洗いをしてください。

〈使用上の注意〉

1. コンタクトレンズに触れる前に必ず手を洗ってください。
2. 使用する前に必ず、オプティ・フリー® デイリークリーナーのボトルをよく振ってください。（振り混ぜた後、液は乳白色になります。）
3. 左右のレンズを取り違える恐れがありますので、レンズは必ず片方ずつ取り扱ってください。
4. レンズは洗浄後必ず、指示された方法で十分にすすぎ洗いし、ソフトコンタクトレンズの場合は消毒してください。
5. オプティ・フリー デイリークリーナーを口に入れたり点眼したりしないでください。
6. 小児の手の届かないところに、室温で保存してください。
7. 容器の先端をどこにも接触させないように注意してください。中の液が汚染される恐れがあります。
8. 使用しないときは容器のふたをしっかりと締めておいてください。
9. 外箱及びラベルに記載されている使用期限を過ぎたものは、使用しないでください。
10. 本剤を使用したソフト、O₂ハードコンタクトレンズを装用中、または装用後に、異常を感じた場合には、直ちにレンズをはずし、眼科医にご相談ください。

〈包装〉

- ・ 12mL入
- ・ 24mL入

無菌液

レンズは毎日の洗浄及び消毒を行ってください。連続装用レンズの場合は、眼科医の指示に従ってください。



2005年9月改訂

製品に関するお問い合わせは
オプティ・フリーコール

☎0120-086-123

受付：月～金曜日（祝日を除く）

9:30-12:00 / 13:00-17:30

<http://www.alcon.co.jp/optifree/>

製造販売元（輸入元）

Alcon®
JAPAN

日本アルコン株式会社

東京都港区赤坂2-17-7

© 2002, 2005 Alcon, Inc.